

DATAR CANCER GENETICS - EUROPE

— GmbH —

Chladicí box udržuje krevní vzorky při konstantní teplotě 2 °C – 8 °C po dobu nejméně 48 hodin.

Chladicí box/chladicí prvek není nutné před použitím ukládat do chladničky!

Instrukce k používání chladicího boxu Nanocool

Otevření boxu a aktivace chlazení



Otevřete box, vyjměte chladicí prvek a položte jej na rovný povrch stříbrnou stranou dolů.

Vložení vzorků do chladicího boxu



Vložte plastový obal s krevními vzorky do chladicího boxu. Testovací žádanku a další lékařské zprávy vložte mezi přední část boxu a vnější karton.

Uzavření a odeslání boxu



Stiskněte aktivací tlačítko přímo dolů palcem. Během 30 sekund až 3 minut se aktivací bod zbarví do modra, což znamená zahájení chladicího procesu. Stříbrná strana se přitom zahřeje.



Vraťte chladicí prvek zpět do boxu. Box uzavřete a zapečete před odesláním. Připevněte přepravní štítek na horní stranu boxu a červenou obálku s dodacím listem na boční stranu.

Důležité informace k používání chladicího boxu

- **Dlouhodobá stabilita teploty:** Chladicí box udržuje krevní vzorky při konstantní teplotě 2 °C–8 °C po dobu minimálně 48 hodin.
- **Skladování před použitím:** Chladicí box ani chladicí prvek není nutné před použitím uchovávat v lednici!
- **Teplotní podmínky:**
 - Skladování chladicího boxu pod 15 °C může způsobit, že se aktivací bod chladicího prvku předčasně zbarví modře – v takovém případě není prvek ještě aktivován.
 - Modrá barva zmizí, pokud box necháte po dobu 15 minut v prostředí s teplotou okolo 21 °C.
 - Box uchovávejte v suchém prostředí při teplotě 17 °C–25 °C. **NIKDY jej neukládejte do lednice nebo mrazáku!**
- **Další doporučení:**
 - Nepoužívejte žádné dodatečné obalové materiály (např. balicí papír, bublinkovou fólii) uvnitř boxu nebo k obalení zkumavek s krví.
 - Víko boxu nesmí být pokryto žádnou další izolací – jinak nebude možné efektivně odvádět teplo z boxu.
 - **Do boxu nekládejte žádné dodatečné chladicí nebo gelové balíčky!** Chladicí kapacita boxu je dostatečná.